

OTOVENT® -hoitomenetelmä

Miksi potilaan tulee käyttää OTOVENTTIÄ?

Lääkäri on määritellyt Sinut tai lapsesi käyttämään OTOVENTTIÄ, koska lääkäri on todennut, että välikorvassa on alipainetta. Hoitamaton alipaine johtaa tilapäiseen paineen tunteeseen sekä myöhemmin kuulon heikentymiseen. Tämän lisäksi erittyy jonkin viikon kuluttua nestettä välikorvaan.

OTOVENTILLÄ tasoituu paine ja oireet lievenevät. Pallot, jotka sisältvät pakkaukseen, on valmistettu luonnonlateksista ja painetestattu. Ne antavat hoidon aikana juuri oikean paineen, joka on välttämätöntä oikeaan hoitolukseen pyrittäessä.



Kuinka käytetään OTOVENTTIÄ?

- ① Nenäsuutin asennetaan palloon.
- ② Pidä suuttimen pyöreää osaa toista sieraintasi vasten ja sulje peukalolla ja etusormella toinen sierain. Suun tulee olla kiinni.
- ③ Puhalla pallo ison grapehedelmän kokoiseksi. Päästä tämän jälkeen ilma pois pallossa sieraimeen tehden samalla nielemisiikkeitä. Pidä samalla suu kiinni ja suutin tiukasti sierainta vasten, sekä pidä toinen sierain suljettuna käyttäen etusormea ja peukaloa.
- ④ Tee tämän jälkeen sama vaihtaan sierainta.

Hoito toimii, mikäli potilas tuntee paineentasauksen korvassa.



**Lue käyttöohjeet
kunnolla
ennen kuin käytät
OTOVENTTIÄ.**

Otoplug Oy
Osuusmynninkatu 7, 33700 Tampere
Puh. 03 3647 215
otoplug.fi
otoplug@otoplug.fi

Saatavana apteekeista



OTOVENT®

OTOVENT® -metoden

Varför skall man använda OTOVENT?

Du eller Ditt barn har nu eller tidigare av Din läkare rekommenderats att använda OTOVENT. Orsaken är att läkaren har konstaterat att det finns ett undertryck med eller utan vätska i mellanörat. Obehandlat undertryck leder till tillfällig tyngdkänsla samt hörselnedsättning. Efter ett fåtal veckor bildas dessutom vätska i mellanörat.

Med OTOVENT utjämns trycket och besvären lindras. De ballonger som medföljer förpackningen är tillverkade i natur-latex och är trycktestade. De ger vid behandling det tryck som är nödvändigt för ett bra behandlingsresultat.



Hur används OTOVENT?

- ① Nässtycket monteras på ballongen.
- ② Håll nässtyckets runda del tätt mot höger näsborre med höger hand. Den vänstra näsborren kläms ihop med vänster pekfinger. Munnen skall vara stängd.
- ③ Blås upp ballongen till en grapefrukts storlek. Släpp därefter ut luften ur ballongen genom näsan samtidigt som sväljrörelse utföres. Håll munnen stängd samt nässtycket tätt mot näsborren.
- ④ Upprepa samma procedur via vänster näsborre med hakan mot vänster skuldra.

Behandlingen fungerar om Du/barnet upplever tryckökning och/eller ett "klick" i örat.



**Läs bruksanvisningen
noggrant
innan du använder
OTOVENT.**

Otoplug Oy

Osuusmellykkatu 7, 33700 Tampere

Puh. 03 3647 215

otoplug.fi

otoplug@otoplug.fi

Finns på apotek

