

## ORFIGUARD

### Orfit Colors Dominant Black NS 2mm mikrorei'itetty tuotenumero: 35903Z/NS

#### A. YLEISET TUOTETIEDOT

ORFIGUARD on suunniteltu suojaamaan kasvot urheilun aikana ja kasvovammojen jälkeen. Maski suojaa nenän, nenäsillan, silmäkuopat ja ympäröivät kudokset. Tämä maski on ihanteellinen urheilijoille, koska se auttaa ehkäisemään uusia vammoja ja suojaa jo olemassa olevia kasvovammoja. Kun urheilija on saanut maskin käyttöönsä, hän voi turvallisesti ja luottavaisesti jatkaa urheilua, luottaen maskin tarjoamaan suojaan.

Lisäksi ORFIGUARD suojaa tehokkaasti nenää, silmäkuoppia ja ympäröiviä kudoksia kasvovammojen jälkeen, mikä parantaa leikkauksen jälkeistä toipumista.

#### B. TUOTTEEN KUVAUS

ORFIGUARD on muotoon leikattu kasvomaskiaihio, joka on valmistettu Orfit Colors Dominant Black NS 2mm mikrorei'itetystä matalalämpömuovista. ORFIGUARD-kasvomaskiaihio on muotoiltavissa jo alhaisessa lämpötilassa, sitä on helppo käyttää, se on tarkasti muotoiltavissa ja se on miellyttävä asiakkaalle.

#### Tärkeimmät tuoteominaisuudet:

- ❖ **Yleismalli:** ORFIGUARD on suunniteltu sopimaan kaikenkokoisille kasvoille (yksi koko sopii kaikille) ilman erityisiä mittoja.
- ❖ **Kestävä materiaali:** valmistettu korkealaatuisista materiaaleista
- ❖ **Kattava suojaus:** Peittää nenän, nenäsillan, silmäkuopat ja ympäröivät kudokset
- ❖ **Nopeasti käyttövalmis:** Valmis lämmitettäväksi ja muotoiltavaksi. Maski käytettävissä heti muotoilun jälkeen.
- ❖ **Erinomainen mukautuvuus ja tarkka istuvuus:** Helposti muotoiltavissa mukailemaan yksilöllisiä kasvon muotoja. Voidaan muotoilla uudelleen tarpeen mukaan.
- ❖ **Muokattavissa:** Voidaan muotoilla sopimaan täydellisesti yksilön anatomisiin piirteisiin.
- ❖ **Leikkauksen jälkeinen käyttö:** Tehokas kasvovammojen jälkeen: helpottaa leikkauksen jälkeistä suojausta ja toipumista.
- ❖ **Kestävä:** Voidaan käyttää useita kertoja, säilyttää tuen ja muodon
- ❖ **Hengittävä muotoilu:** Mikrorei'itys parantaa ilmavirtausta ja mukavuutta.
- ❖ **Erinomainen mukavuus:** Suunniteltu muotoiltavaksi suoraan kasvoille, mikä maksimoi käyttömukavuuden
- ❖ **Stabiili:** Päähihnan muotoilu takaa napakan, turvallisen ja miellyttävän istuvuuden.
- ❖ **Käyttäjäturvallinen:** Helppo käyttää ja säätää tarpeen mukaan.
- ❖ **Ihoystävällinen:** Allergisoimaton, turvallinen iholle, tarttumaton ja ärsyttämätön pinta
- ❖ **Näppärän kokoinen:** Kevyt ja helppo kuljettaa, helposti mukaan otettavissa

#### ORFIGUARD-pakkauksen sisältö:

- Matalalämpömuovinen maskiaihio:**  
Yksi muotoon leikattu pala Orfit Colors Dominant Black NS 2mm mikrorei'itettyä matalalämpömuovia
- Pehmeät vaahtomuovipalat (Luxofoam):**  
Yksi pala (7cm x 7cm) nenälle  
Neljä kappaletta (3cm x 4cm) poskille ja otsalle
- Päänauha:**  
Viisi kaksipuoleista nukkanauhaa koukkutarrakiinnityksellä  
Takakappale, johon on painettu Orfit-logo
- Käyttöohjeet**



! Huomaa, että maski myydään litteänä ja se on lämmitettävä ja muovattava kasvoille sopivaksi.

### C. VAROTOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ

1. Työskentelytilan on oltava hyvin ilmastoitu.
2. Täytä lämminvesiallas tai muu lämminvesiastia. Säädä lämpötila 65 - 67 asteeseen (149 - 153 ° F).
3. Tarkista maskiaihion lämpötila ennen kuin muotoilet sen potilaan kasvoille.

### D. MUOVIN AKTIVOINTI

Laita maskiaihio lämmitettyyn veteen (65 - 67 °C) ja odota **3 minuuttia**, kunnes se tuntuu muovattavalta.

- ! **Veden lämpötilan tulisi olla 65 - 67 ° C (149 - 153 ° F).**
- ! **Pienin lämmitysaika on 3 minuuttia.**
- ! **Älä lämmitä ahiota yli 20 minuuttia.**
- ! **Älä koskaan käytä avotulta aihion aktivoimiseen.**

### E. TYÖSKENTELYVAIHEET

1. Leikkaa vaahtomuovipala nenän muotoon sopivaksi.
2. Poista vaahtomuovipalan takaa suojapaperi ja kiinnitä vaahtomuovipala nenään. (itseliimautuvan puolen tulee tarttua nenään)

**Vinkki:** Laita hieman vettä vaahtomuovin tarrapinnalle vähentämään liiman tarttuvuutta.



3. Laita maskiaihio lämmitettyyn veteen (65 - 67 °C) ja odota **3 minuuttia**, kunnes se tuntuu muovattavalta.

**Vinkki:** Lisää veteen saippuaa, jotta aihio ei tartu altaassa olevaan metalliristikoon.

4. Ota aktivoitu maskiaihio vedestä ja anna pintojen jäähtyä tai kuivua pyyhkeellä muutaman sekunnin ajan.

! **Tarkista maskin lämpötila ennen kuin panet sen asiakkaan kasvoille, jotta se ei aiheuta palovammoja.**

5. Muotoile maski asiakkaan kasvoille. Varmista, että nenäosa istuu hyvin, koska se on Orfiguardin tukevuuden ja paikallaan pysyvyyden kannalta tärkein kohta.



6. Jatka muotoilua, kunnes maski jähmettyy. Tämä kestää 1-2 minuuttia huoneen lämpötilasta riippuen.

Jätä maski potilaan kasvoille vielä 5 minuutiksi, jotta se kovettuu kokonaan.

7. Merkitse tarpeettomat, poisleikattavat osat kynällä tai tussilla.



8. Poista naamio kasvoilta.

9. Poista vaahtomuovipala maskista.



10. Leikkaa tarpeettomat osat pois merkintöjesi mukaan.



11. Tasoita leikatut reunat kuumailmapuhaltimella tai kastamalla 65-asteiseen veteen.  
**! Varo ylikuumentamista materiaalia, koska se voi menettää muotonsa.**

12. Kiinnitä vaahtomuovipalat muotoillun maskin sisään.



13. Kiinnitä kiinnitysnauhat maskiin.



14. Aseta maski kasvoille.

15. Aseta Orfit-logolla varustettu takakappale pään takaosaan ja kiinnitä nauhat takakappaleeseen.



16. Varmista, että maski, nauhat ja takakappale istuvat kasvoille tiiviisti, mutta eivät liian tiukasti. Leikkaa sitten ylimääräinen nauhamateriaali pois.



## F. PUHDISTUS JA JÄTEHUOLTO

Tämä tuote voidaan puhdistaa ja desinfioida saippuavedellä tai isopropanolipohjaisella desinfiointiaineella kostutetulla pehmeällä liinalla. Jos olet epävarma puhdistusnesteen soveltuvuudesta, älä käytä sitä. Älä käytä koskaan aerosolisuihkeita, syövyttäviä puhdistusaineita, liuottimia tai hankaavia pesuaineita. ORFIGUARDin säännöllinen puhdistaminen poistaa myös maskin pinnalle mahdollisesti muodostuneen kuolleiden bakteerien kerroksen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Tuote voidaan hävittää talousjätteen mukana.

## G. NEUVOJA ASIAKKAALLE

- ! **Anna asiakkaalle riittävät tiedot ORFIGUARDin oikeanlaisesta käytöstä ja mahdollisista rajoituksista.**

## H. VARASTOINTI

- ORFIGUARD on säilytettävä alkuperäispakkauksessaan ennen käyttöä.
- Säilytys pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa. Lämpötila vähintään 10 °C (50 °F) ja enintään 30 °C (86 °F).

Matalalämpömuoveja voidaan säilyttää vain rajoitetun ajan, ja ne on suojattava mahdollisimman hyvin valolta, lämmöltä ja kosteudelta. Termoplastisen materiaalin ikääntyminen on suorassa suhteessa varastointiolosuhteisiin. Vanhaksi menneet termoplastiset materiaalit muuttuvat hauraiksi ja liian pehmeiksi aktivoitaessa. Liian lämpimässä termoplastiset materiaalit muuttuvat pehmeiksi ja muuttavat muotoaan.

## I. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

- ! \* **ORFIGUARD ei sovellu sisäiseen käyttöön. Sitä ei saa käyttää avoimiin haavoihin tai suuhun.**  
! \* **Älä koskaan aktivoi ORFIGUARDia avotulella.**  
! \* **ORFIGUARDin muotoilun saavat tehdä vain terveydenhuollon ammattilaiset.**

## J. LISÄTIETOJA

Lisätietoja, kuten jälleenmyyjien yhteystiedot, tuote-esitteet, käyttöturvallisuustiedotteet ja tekniset tiedotteet sekä lakisääteiset tiedot, löytyvät verkkosivustollamme [www.orfit.com](http://www.orfit.com). (Sivusto on englanniksi.)

### Huomio:

Ohjeet on kirjoitettu lääkinällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti. Tähän tekstiin ei saa tehdä muutoksia ilman Orfit Industriesin etukäteen antamaa lupaa. ORFIT™ on ORFIT INDUSTRIES N.V.:n rekisteröity tavaramerkki.



**ORFIT INDUSTRIES**  
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium  
T (+32) (0)3 326 20 26  
welcome@orfit.com

[www.orfit.com](http://www.orfit.com)



Viitenumero  
50259 VERSIO  
1  
PÄIVITETTY VIIMEKSI:  
05/06/2024 TARKISTUSPÄIVÄ:  
05/06/2026